



▷ à l'officine 

Code produit	Taille	Unité de livraison
4384233	2 m x 10 cm	12 boîtes
4384227	10 m x 5 cm	12 boîtes
4384204	10 m x 10 cm	6 boîtes
4384210	10 m x 15 cm	6 boîtes

▷ à l'hôpital

Code produit	Taille	Unité de livraison
72378-03	2 m x 10 cm	12 boîtes
72378-00	10 m x 5 cm	12 boîtes
72378-01	10 m x 10 cm	12 boîtes
72378-02	10 m x 15 cm	12 boîtes



Hypafix® transparent

Film adhésif transparent en rouleau



Indications

Fixation imperméable de :

- Pansements de grandes dimensions,
- Tubulures,
- Dispositifs de mesure



Caractéristiques

Support polyuréthane transparent :


- Imperméable aux liquides, bactéries et virus
- Laisse la peau respirer
- Permet de surveiller le niveau de saturation du pansement
- Radio-transparent

Masse adhésive acrylique à haute tolérance cutanée

- Idéal pour les peaux sensibles ou fragiles
- Fixation fiable et durable

Film extra-fin comme une seconde peau qui épouse parfaitement les reliefs anatomiques

Présentation économique en rouleau pour une découpe à la longueur souhaitée

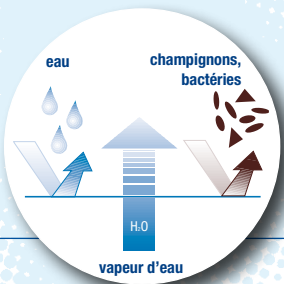

Simple et Rapide à appliquer !

1



Couper la bande à la longueur désirée en s'aidant du quadrillage de l'élément protecteur.

2



Etirer légèrement la bande d'Hypafix® transparent dans le sens de la largeur (bande d'application rouge à gauche) afin de séparer l'élément protecteur au niveau de la pré-découpe centrale.

3



Retirer la partie droite de l'élément protecteur.
Appliquer la partie droite du film en veillant à bien insister au niveau des bords.

4



Retirer la partie gauche de l'élément protecteur, en insistant bien au niveau de la bande d'application rouge.

5



Retirer l'ensemble de l'élément protecteur.

6



Le film est posé.

Un retrait indolore



Pour enlever le film, soulever un coin et tirer parallèlement à la peau.